


## AIRVO 操作流程

### 开机

1. 连接电源
2. 安装湿化水罐，连接湿化水，观察是否有水流至水罐中
3. 连接呼吸管路（将蓝色卡套向上推，连接管路至治疗机，将蓝色卡套向下推至卡紧）
4. 连接病人界面
5. 按开关机键  开机，治疗机会依次出现 AIRVO ---消毒次数---距上次消毒时间
6. 进入预热界面，治疗机会按照上次设置运行。如需连接氧气，请开启氧气流量计至所需



如果无需更改设置，可以不需要进行操作

如需更改设置，

按  键进入设置，依次进入目标温度-流量设置。设置方法：

#### • 更改目标温度设置：

- 同时按住上下箭头3秒，解锁
- 按向下箭头
- 37改为34
- 按模式键确认重新锁定



#### • 再次按下模式键进入流量设置


- 流量范围10-60升/分，增幅1-5升/分

- 关机后AIRVO会记住目标流量。




解锁-----调整-----确认

7. 听到治疗机有就绪声音后，可以连接至病人。治疗机此时可能并未达到目标温度，治疗

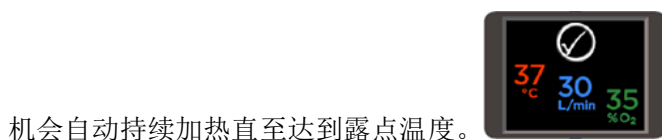




## 关机：

1. 取下病人界面
2. 关氧气流量计，待治疗机上氧浓度降至 21%后，按开关机键  关机
3. 断开病人界面及管路连接，从治疗机上取下呼吸管路（将蓝色卡套向上推，拔下呼吸管路）。待治疗机稍凉后，取下湿化水罐。

## 治疗机消毒

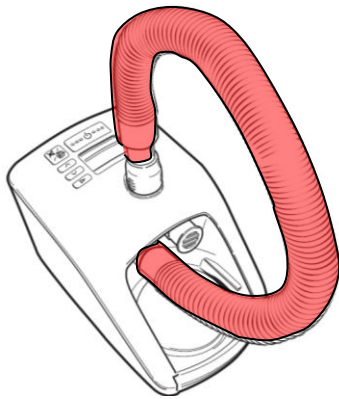1. 连接电源
2. 连接消毒管路至治疗机如图示：



3. 按开关机键 ，治疗机会自动进入消毒模式，进行 55 分钟消毒。
4. 消毒结束后，治疗机会出现消毒次数
5. 按开关机键  关机
6. 待管路稍凉后取下管路
7. 将治疗机罩好备用。